

iD SLIP

ANLEGEHINWEIS



iD Slip

Inkontinenz-Slip für mittlere bis schwere Inkontinenz



stehend



1. Falten Sie den iD Slip mit den Fingern vorsichtig in der Mitte, unterhalb der Unterseite.



2. Ziehen Sie den iD Slip von hinten nach vorne durch die Beine. Entfalten Sie die beiden Enden und stellen Sie sicher, dass das hintere Ende am Steißbein anliegt.



3. Befestigen Sie dann die oberen, wiederverschließbaren Klebestreifen leicht abwärtsgerichtet oder horizontal so, dass ein sicherer Sitz um die Taille gewährleistet ist.



4. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt angenehm und sicher sitzt. Wenn erforderlich, können die Klebestreifen neu positioniert werden.

Die persönliche, diskrete und kompetente Beratungshotline:

Montag bis Freitag 8.00 bis 18.00 Uhr

0800 6646934

(kostenlose Hotline oder Tel. 05404 9995300)

Ontex Healthcare Deutschland GmbH | Hansaring 6 | 49504 Lotte

Ontex