

iD for
men

ANLEGEHINWEIS



iD for men


Speziell für den Mann
entwickelte Vorlagen für
leichte bis mittlere
Blasenschwäche




stehend



1. Entfalten Sie die
iD for men Einlage und
entfernen Sie das Papier
vom Klebestreifen.

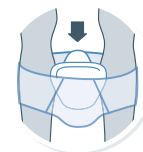

2. Stellen Sie sicher,
dass die breite Seite
des Produkts vorne liegt.
Legen Sie die Einlage in
Ihre Unterwäsche und
prüfen Sie, ob der Klebe-
streifen sie korrekt fixiert.

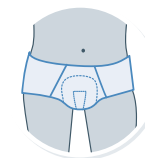

3. Ziehen Sie dann Ihre
Unterwäsche so an, dass
das Produkt angenehm
und sicher sitzt. Nutzen
Sie bitte körpernahe
Unterwäsche.

Die persönliche, diskrete und
kompetente Beratungshotline:

Montag bis Freitag 8.00 bis 18.00 Uhr

0800 6646934

(kostenlose Hotline oder Tel. 05404 9995300)

Ontex Healthcare Deutschland
GmbH | Hansaring 6 | 49504 Lotte

Ontex